

## МАНИПУЛЯЦИИ, ПРОЦЕДУРЫ

### ТЕСТ НА ФЕТАЛЬНЫЙ ГЕМОГЛОБИН АПТА (Apt test)

I.

**Цель:** Дифференциация в стуле крови плода от проглоченной материнской крови.

II.

**Методика:** Смешайте выделения с 3-5 мл воды и центрифугируйте. Если надосадочная жидкость имеет розовый цвет, продолжите. К 5 частям центрифугата добавьте 1 часть 0,25% Нормального (1%) NaOH.

III.

**Трактовка:** Розовое окрашивание, сохраняющееся более двух минут, указывает на наличие фетального гемоглобина. Гемоглобин взрослых дает розовое окрашивание, становящееся желто-коричневым в течение двух минут и ранее, указывая на денатурацию гемоглобина взрослого типа.